

Jednorazové lekárske rúško na tvár (nesterilné)



Funkcia

Používa sa jednorazovo na ochranu zdravia v bežnom prostredí a nemôže sa používať ako špeciálna ochrana pri výkone chirurgickej operácie.

Technické údaje

BFE $\geq 95\%$

Dychová rezistencia $\leq 49\text{Pa}/\text{cm}^2$

Jednorazové chirurgické rúško na tvár (nesterilné)

Funkcia

Poskytuje fyzickú bariéru na zabránenie priamej penetrácie mikroorganizmov, telesných tekutín, častíc a pod.

Technické údaje

BFE $\geq 95\%$ PFE $\geq 30\%$

Dychová rezistencia $\leq 49\text{Pa}/\text{cm}^2$


Penetračný test na syntetickú krv



Charakteristické znaky

- Hypoalergénna
- Vzdušná
- Pohodlná
- Bez sklenených vlákien


Materiál

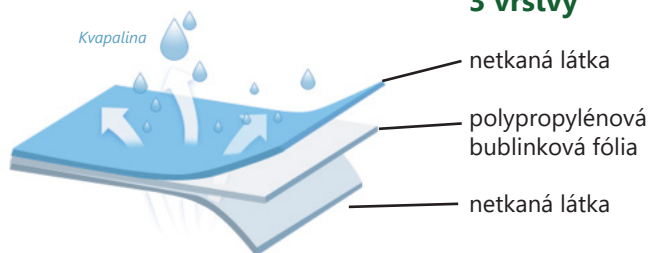


Informácie na obale

Č. položky	Názov produktu	Veľkosť produktu	Balenie	Veľkosť krabice	Veľkosť kartónu
FM101 001	Jednorazové lekárske rúško na tvár	17,5 cm x 9,5 cm (gumička na uši)	50 ks / krabica 40 krabic / kartón 2000 ks / kartón Neutrálne balenie	18 x 10 x 8,5 cm	41,5 x 37 x 44,5 cm
SFM101 001	Jednorazové chirurgické rúško na tvár				

Návod na použitie

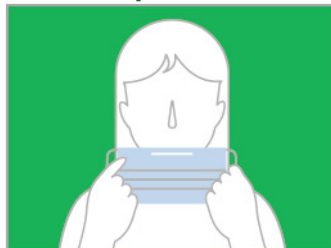


1. Otvorte balenie, masku vyberte a predtým ako si masku dáte na tvár natiahnite gumičky.

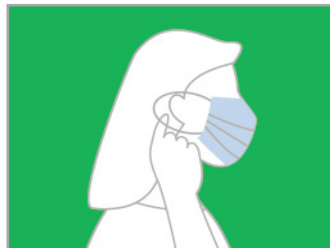

2. Ubezpečte sa, aby bola časť masky s vystuženým okrajom hore. Masku držte za gumičky na uši. Gumičky dajte za uši. Spodnú časť masky potiahnite cez svoje ústa a bradu.



3. Vystužený kraj stlačte, aby príšnul k tvaru vášho nosa.

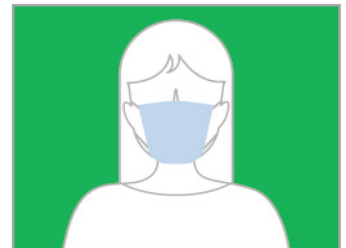

4. Masku opravte do pohodlnej polohy.